

## LS2 Kit by D. Vinci

La forme spéciale des fraises permet une coupe très précise tout en donnant un aspect brillant à la surface. Pour le rendu final il suffit de polir avec des gommés et de la pâte diamantée pour donner l'aspect brillant à la restauration. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un glaçage de la céramique .

Les nombreuses lames des fraises réalisent une micro coupe de la matière ce qui permet de retoucher même les zones les plus fines sans risquer de fracturer les restaurations. Les fraises ne surchauffent pas la surface de travail ce qui évite les micros-fissures.

### Domenico Vinci

Propriétaire du laboratoire dentaire Vinci Dental Concept, Domenico Vinci s'est spécialisé en prothèse fixe esthétique, en implantologie et compte plus de 30 ans d'expérience avec les systèmes Full ceramics (Alumine, Zircon, Lithium disilicate...)



Actif dans le domaine de la recherche clinique, il est l'initiateur de nouvelles techniques prothétiques et d'études scientifiques. Depuis 2005, Domenico Vinci est opinion leader pour la maison Ivoclar, il officie en tant que conférencier et formateur au niveau international.

### Axis Dental


Axis Dental est une entreprise spécialisée dans la fabrication, commercialisation et distribution de fraises dentaires, tenons radiculaires et solutions de blanchiment de dents. Fondée en 1995 en Suisse, Axis Dental a pour objectif d'offrir aux médecin-dentistes les meilleures solutions pour simplifier leur travail quotidien tout en garantissant des résultats et efficacité optimaux.

#### Axis Dental Sàrl.

Chemin du Closalet 4- 1023 Crissier- Switzerland  
Tél +41 (0)21 633 06 33 - Fax +41 (0)21 633 06 39 - mail@axis-dental.ch - www.axis-dental.com

## LS2 Kit by D. Vinci

La solution pour le travail de surfaces  
de Lithium Disilicate

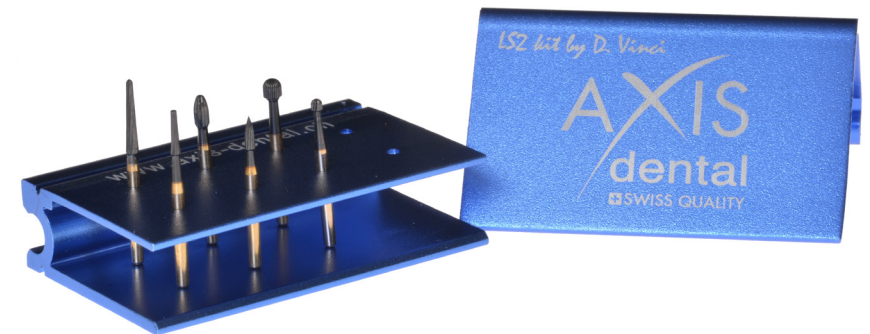


# LS2 Kit by D. Vinci

Imaginé par Domenico Vinci, *LS2 Kit by D. Vinci* est un assortiment de fraises pour le travail de surface du lithium disilicate. Son traitement DLC confère aux fraises en carbure de tungstène une durée de vie inégalée.

*LS2 Kit by D. Vinci* peut être utilisé **avec ou sans eau** par le technicien dentiste pour le façonnage des restaurations ou par le dentiste pour les retouches intra-orale après scellement des prothèses.

## DLC FG 212.012 Coupe régulière et fine

Son angle à 90° sur sa pointe permet de créer des effets de fissures très fins et précis. Idéale pour l'état de surface général.

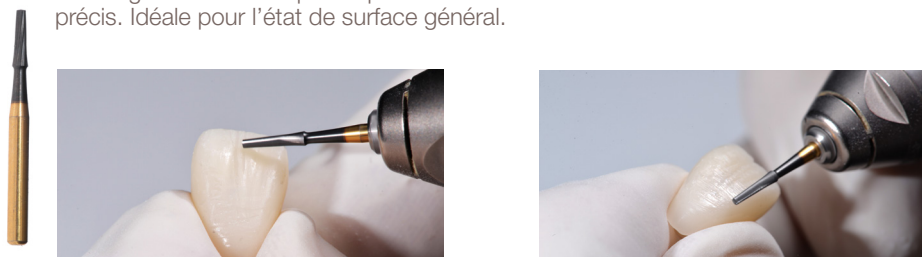

## DLC FG 48.012 Coupe régulière et très fine

Sa forme en pointe donne des effets de surface plus précis. Idéale pour la finition des bords très fins, l'anatomie des surfaces occlusales et les espaces inter-dentaires. Elimine l'excès de collage après scellement entre la gencive et la couronne.



## DLC FG 212RL.016 Coupe régulière et fine

Son angle arrondi sur sa pointe permet d'enlever des imperfections dans l'intrados de la couronne. Idéale pour l'état de surface général.




## DLC FG 41.014 Coupe régulière et fine

Sa forme en boule donne des effets de surface tel que périkymatie. Idéale pour le dégrossissage général de la pièce et pour les retouches occlusales après scellement.



## DLC FG 44E.018 Coupe régulière et agressive

Sa forme en poire permet de donner des effets de surface plus importants. Idéale pour le dégrossissage général de la pièce et les retouches occlusales après scellement. Ne pas utiliser sur les bords fins.

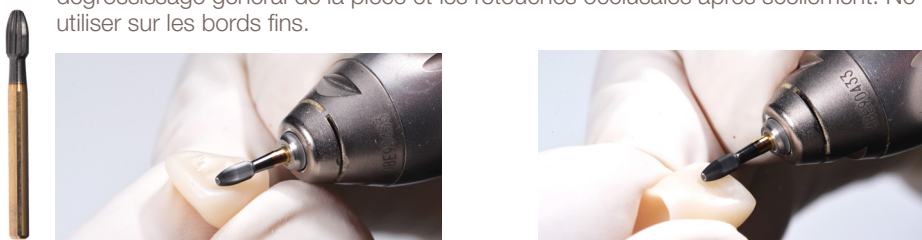

## DLC FG U 41.023 Coupe régulière et très fine

Sa forme en boule donne des effets de surface tel que périkymatie. Idéale pour le dégrossissage général de la pièce et pour les retouches occlusales après scellement.

